

MACRO-LOCK™ ILLUSION™ X-RO®



MACRO-LOCK™ ILLUSION™ X-RO®
Intro KIT

Descripción


MACRO-LOCK™ ILLUSION™ X-RO® es un poste de Fibra de Cuarzo con macro-retención que incorpora una resina coloreada que se vuelve traslúcida a temperatura oral. El color del poste reaparecerá cuando se requiera, al aplicársele aire o spray frío; por ejemplo, si fuese necesario realizar el retratamiento del conducto.

Indicación

En el caso de una estructura de diente residual insuficiente (<4mm), se necesita un poste para soportar y garantizar una restauración coronal. No es recomendable utilizar un poste si la estructura coronal del diente es menor que 1,5mm.

Propiedades

Fuerza de Flexión	Resistencia a la Fatiga
1.800 – 2.000 MPA	10.000.000 de ciclos sin romper

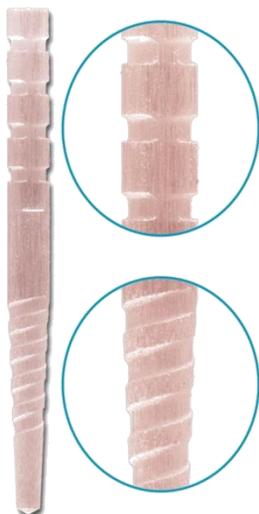

Resistencia al cizallamiento	Módulo de elasticidad
65 – 70 MPA	Semejante a la dentina (20 MPA a 30 MPA)

Radiopacidad	Alta Retención
340% Al que. (ISO 4049)	Su macro-retención otorga características anti-rotacionales e interactúa con el cemento y el material de muñón mejorando la retención.

MACRO-LOCK™ ILLUSION™ X-RO®


Precauciones

- El poste debe ser limpiado con alcohol antes de su inserción en el canal. Evitar tocar los postes con los dedos después de su limpieza.
- Debería cortarse el poste fuera de la boca.
- Se recomienda el uso de dique de goma.

Medidas

	● 1	● 2	● 3	● 4
∅ apical de la punta	0,80	0,80	1,00	1,00
∅ apical del poste	1,35	1,47	1,67	1,83
Fresa "Starter Drill"	#1	#1	#2	#2
Fresa Final	#1	#2	#3	#4

Modo de Empleo

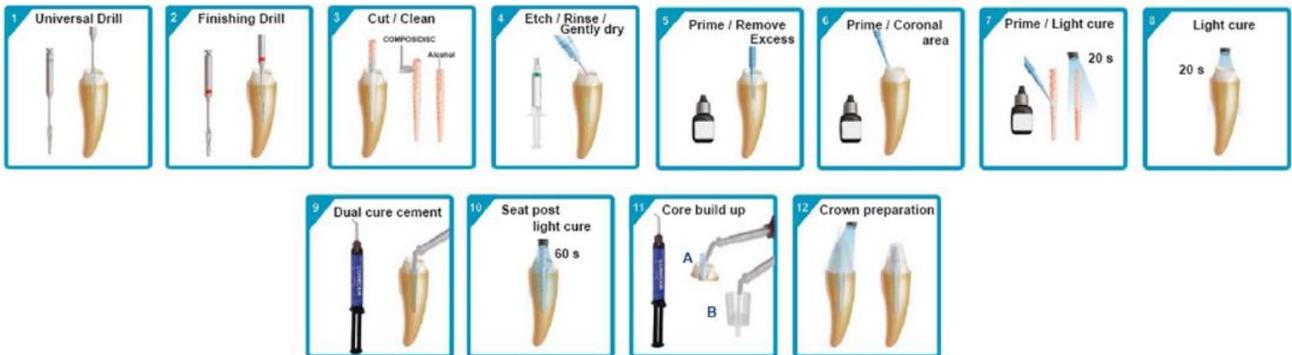

Presentaciones

MACRO-LOCK™ ILLUSION™ X-RO® INTRO KIT

Ref. 3990

- 20 postes. 5 de cada diámetro (∅ 1 - ∅ 2 - ∅ 3 - ∅ 4)
- 2 Fresas Starter Drill (∅ 1 - ∅ 2)
- 4 Fresas Final ((∅ 1 - ∅ 2 - ∅ 3 - ∅ 4)

Recambios MACRO-LOCK™ ILLUSION™ X-RO®

- Ref. 3991 Recambio 10 postes ∅ 1
- Ref. 3992 Recambio 10 postes ∅ 2
- Ref. 3993 Recambio 10 postes ∅ 3
- Ref. 3994 Recambio 10 postes ∅ 4