



Un desinfectante que
no deja escapar
ningún germen...



NDP Air Total+



Ideal en desinfecciones terminales

NDP Air Total+ es un producto para la desinfección de superficies clínicas por vía aérea. Se descarga totalmente a través de su válvula "one-shot", que permite nebulizar el contenido en una sola aplicación. No contiene gases inflamables ni ingredientes tóxicos, lo cual permite su utilización en lugares donde otros productos no pueden ser aplicados. Tiene un amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, hongos y virus. Además, elimina olores provocados por la descomposición bacteriana. El uso de NDP Air Total+ es totalmente compatible con la presencia de todo tipo de materiales y componentes electrónicos. La nebulización permite el acceso de la fórmula desinfectante a rincones difícilmente accesibles mediante otros medios, lo que hace a NDP Air Total+ ideal en desinfecciones terminales.

Modo de uso



1. Colocar el envase sobre una superficie lisa y desprecintar.

2. Presionar y girar la válvula de descarga total.

3. La nube de producto, que se forma en 1-3 minutos, elimina bacterias, hongos y virus de las superficies en 15 minutos.

El plazo de seguridad es de 3 horas. Ventilar antes de entrar en el recinto.

- Eficacia demostrada contra *Aspergillus niger*
- Desinfección por vía aérea sin nebulizadores
- No inflamable
- Excelente compatibilidad con los materiales
- Sin aldehídos tóxicos

Composición

Cloruro de didecil dimetil amonio
Fenoxietanol, cinamaldehído, alcohol isopropílico
Propelente y excipientes

Eficacia

Eficaz contra bacterias (EN1276) *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, hongos (EN1650) *Aspergillus niger*, *Candida albicans*. Los principios activos contenidos en el producto NDP Air Total+ presentan además la siguiente eficacia: *Penicillium glaucum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis*, *Clasdosporium clasdosporoides*, *Penicillium verrucosum*, *Aspergillus versicolor* y virus.

Presentación

Envase de 50 ml (para la desinfección de 40 m3).
Envase de 300 ml (para la desinfección de 150 m3).

Código de producto

AT+50 (formato 50 ml)
AT+300 (formato 300 ml)

Aplicaciones

Quirófanos
Áreas de infecciosos y similares
Transporte colectivo
Ambulancias
Laboratorios
Salas blancas
Consultas médicas
Consultas veterinarias
Oficinas
Colegios
Hoteles
Conductos de aire acondicionado
Salas de reuniones



Vesismín S.L.
Gran Vía Carlos III, 94
08028 Barcelona
T. +34 934 095 301
F. +34 933 396 628
www.vesismin.com

Código folleto: AT+Ev01