

# Inibsa Air Total

Ideal para desinfectar  
boxes de cirugía.  
Válvula ONE SHOT  
(gas propelente ecológico).  
Eficaz contra Coronavirus.

Desinfectante ambiental especial para espacios cerrados. Ayuda a mantener los boxes de la clínica lo más asépticos posible.

Rápido y con amplia gama de espectro (eficaz contra bacterias, hongos y virus con envoltura).



## Características

Inibsa Air Total es un desinfectante destinado a reducir la carga microbiológica existente en el ambiente. Su válvula *one-shot* distribuye el producto por el espacio mediante nebulización, consiguiendo así un reparto uniforme (hasta en zonas de difícil acceso) y ayudando a obtener un box lo más aséptico posible. Características idóneas para salas donde se realizan cirugías. Además, tiene un amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, hongos y virus. No contiene gases inflamables ni ingredientes tóxicos y es totalmente compatible con todo tipo de materiales. Para la desinfección de boxes de hasta 40m<sup>3</sup>.


## Modo de empleo

Se recomienda la utilización de guantes, gafas de protección y mascarilla durante la manipulación de este producto.

- 

1 Colocar el envase sobre una superficie llana y desprecintar.
- 

2 Presionar y rotar hasta fijar la válvula. Se forma una nube de producto en aprox. 1 minuto, que cubre hasta 40 m<sup>3</sup>.
- 

3 Una vez completada la descarga, dejar actuar. Aplicar en ausencia de personas.
- 

4 Esperar mínimo 1 hora, o lo que indique la regulación local. Ventilar antes de entrar de nuevo en el recinto.

## Composición

Cloruro de didecil dimetil amonio / Fenoxietanol / Cinamaldehído / propelente y excipientes.

## Recomendaciones y precauciones de uso

Antes de usar, lea atentamente la etiqueta y consulte la ficha técnica. No utilizar conjuntamente con productos que contengan o liberen cloro (hipocloritos) ni con detergentes en base a tensoactivos aniónicos. Recipiente a presión. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Evitar respirar el aerosol. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar sobre una llama o cuerpo incandescente. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición – no fumar. Mantener a temperaturas superiores a 0°C. Evitar la congelación. Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

## Propiedades microbiológicas

Eficacia	Tiempo (min)	Reducción
<b>Bactericida (UNE-EN 1276)</b> Gram + ( <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> ) Gram - ( <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> ) <i>Streptococcus equi subs. equi</i>	1 min	>5 log <sub>10</sub>
	5 min	
<b>Bactericida (UNE-EN 13697*)</b> Gram + ( <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> ) Gram - ( <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> ) <i>Salmonella enterica</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> resistente a la meticilina, <i>Enterococcus faecalis</i> resistente a la vancomicina	5 min	>4 log <sub>10</sub>
	15 min	
<b>Bactericida (EN 13727)</b> <i>Bordetella bronchiseptica</i> Gram + ( <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> ) Gram - ( <i>Pseudomonas aeruginosa</i> )	5 min	>5 log <sub>10</sub>
	5 min	
<b>Fungicida (UNE-EN 1650)</b> <i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>	15 min	>4 log <sub>10</sub>
<b>Fungicida (UNE-EN 13697*)</b> <i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>	15 min	>3 log <sub>10</sub>
<b>Fungicida (EN 13624)</b> <i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>	30 min	>4 log <sub>10</sub>
	5 min	>4 log <sub>10</sub>
<b>Virucida (EN 14476)</b> <i>Influenza A (H1N1)*</i> *Virus gripal surrogado para virus lipofílicos (Gripe, Coronavirus, Ébola, Hepatitis, HIV...) <i>Vaccinia virus cepa Elstree/Ankara**</i>	15 min	>4 log <sub>10</sub>
	5 min	
<b>Mycobactericida (EN 14476)</b> <i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i>	10 min	>4 log <sub>10</sub>

Distribuido por:

**Inibsa Dental, S.L.U.** Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (España). T +34 938 609 500 - F +34 938 439 695

**Vesimin S.L.** C/ Lluçà 28, 5º planta 08028 - Barcelona, España.

Contacta con nosotros: 902 464 272 | [www.inibsadental.com](http://www.inibsadental.com) | [dental@inibsa.com](mailto:dental@inibsa.com)

Síguenos en:  |  |  | 