



ORTHOCARE

Excellent Oral Care
During Orthodontic Treatment

- Previene el desarrollo de lesiones de manchas blancas
- Reparación y remineralización del esmalte, gracias al aporte de nano-Hidroxiapatita
- Prevención de caries con xilitol y nano-Hidroxiapatita
- Elimina o reduce la hipersensibilidad dental.
- Dientes de aspecto más blanco
- Libre de flúor

PROTOCOLO DE USO en 4 Sencillos Pasos

1

15 días antes de empezar el tratamiento



Cada nuevo paciente inicia su tratamiento con un Kit de Remineralización de nHAp

El Kit de Remineralización contiene:
4 esponjas nHAp Boost
1 Serum Reparador nHAp de 30 ml

Use una de las cuatro esponjas, del Kit de Remineralización, explicándole al paciente que utilice las tres esponjas restantes en su casa, una cada 5 días.

Para extraer el fluido de la esponja, apriete el área de bloqueo, presionando con el pulgar y el índice hasta que sienta que se rompe. Luego presione el extremo del tubo más alejado de la esponja, hasta que vea que el material se mueve de una cámara a otra. Apriete y suelte algunas veces hasta que se vuelva espumoso dentro de la segunda cámara y en la esponja. Aplique la esponja firmemente, asegurándose de que el material forma espuma en la esponja y en los dientes ¡No enjuague!

Durante 2 o 3 minutos, deje que los dientes absorban el material nHAp Boost. No enjuague, coma o beba durante 15-20 min. Se puede escupir o tragar material adicional.

Saque el Serum Reparador nHAp de 30 ml y explique al paciente que deberá reemplazarlo por su pasta de dientes habitual.

Para el cepillado, utilice tamaño de una lenteja de material, 2 a 3 veces por día, hasta acabar el material.

2

Al finalizar cada revisión



Antes de entregar cada alineador o después de cementar brackets, aplique una esponja nHAp Boost, apretando el fluido nHAp de la ampolla hacia la esponja, al igual que en el paso 1

3

Durante todo el tratamiento



Proporcione al paciente una pasta dental OrthoCare, cada 6 semanas aproximadamente. Explíquelo al paciente que deberá usar esta pasta de dientes en reemplazo de su pasta habitual y que debe cepillarse de 2 a 3 veces por día. Para obtener excelentes beneficios, proporcione una botella de enjuague bucal sin alcohol para después de cada cepillado.

4

Finalización del tratamiento



Entregue al paciente un nuevo Kit de Remineralización para el hogar.

Aplique una esponja de refuerzo nHAp después de retirar el último alineador o de retirar brackets.

Coordine una cita de 45 minutos para un tratamiento profesional de remineralización con nHAp o bien un tratamiento de blanqueamiento nHAp PrevDent en clínica.