

ROYAL LAB 2000

LIMPIADOR TRIENZIMÁTICO CONCENTRADO PARA LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL MÉDICO

Propiedades

Concentrado líquido para la limpieza enzimática y descontaminación manual de instrumental general, paso previo a la desinfección de alto nivel y/o a la esterilización. La solución contiene un conjunto de enzimas para un nivel superior de limpieza, permitiendo retirar cualquier resto de materia orgánica. Las enzimas presentes en el producto son proteasas que limpian restos de sangre, tejidos y mucosidades, lipasas que limpian restos de grasa y amilasas que eliminan compuestos de almidón muy presentes en los alimentos. Sus componentes de limpieza y principios activos seleccionados, consiguen una profunda descontaminación, además de ejercer potente acción detergente.

Producto Sanitario Clase I

2017/745 (MDR)

UDI-DI BÁSICO: 8437025784EXP005CL

UFI: AQ00-X0TU-X00D-3JU9

Características técnicas

Total viables (micro): < 10UFC/ml o g

Patógenos: ausencia

Aspecto: líquido

Color: azul

Olor: característico

Densidad relativa a 20 °C: 1,021

pH solución: 9,0 ± 1



Presentación

1 litro y 5 litros

Aplicaciones

Limpieza profunda de material médico por inmersión.

Modo de empleo y dosis

Diluir al 2% en una cuba de inmersión (20 ml de ROYAL LAB 2000 y 980 mL de agua) a temperatura ambiente. Si es necesario, según el grado de suciedad, la concentración puede aumentarse al 5%. Sumergir los instrumentos después de cada uso, de manera que todas las superficies queden cubiertas, mínimo 5 minutos. Enjuagar o aclarar con agua. Secar con papel y preparar para la desinfección de alto nivel y/o esterilización. Renovar la solución regularmente (al menos una vez al día).

Composición

Complejo enzimático (compuesto por proteasas, amilasas, lipasas). Tensoactivo no iónico, inhibidores de corrosión, agente complejante, compuesto de amonio cuaternario, colorante.

Condiciones de conservación

Temperatura recomendada de conservación:



Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Vida útil

2 años

12 meses desde apertura de envase

Acreditaciones



Impacto ambiental

ROYAL LAB 2000 es un producto fácilmente biodegradable. El embalaje de polietileno y polipropileno se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. La Ficha de datos de seguridad contiene las instrucciones de eliminación.

Advertencia de seguridad

ROYAL LAB 2000 está clasificado y etiquetado según reglamento CLP, ver etiquetado y fichas de datos de seguridad del producto.

Información orientativa con fines comerciales. Producto exclusivamente profesional. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y ficha de datos de seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro departamento técnico para resolver posibles dudas.

Ref.: 90276 Royal Lab 2000 1l udi-di: 8437025784370

Ref.: 90277 Royal Lab 2000 5l udi-di: 8437025784394

Versión/fecha: 1 – 31.01.2024

ROYALDENT

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

ROYAL SULGERINS, S.L.

C/ Cuzco nº 23-25 - 08030 Barcelona

t.: 933463222

www.royal-dent.com