

Bacillo[®] 30 Foam



Descripción general del producto

Bacillo[®] 30 Foam es una solución desinfectante, lista para su uso y libre de aldehídos, para la desinfección rápida de superficies sensibles de productos sanitarios.

Bacillo[®] 30 Foam lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase IIa (TÜV 0482).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Bacillo[®] 30 Foam que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Bacillo[®] 30 Foam quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones/Indicaciones

Gracias a su formato de espuma es adecuado para la desinfección rápida por frotación / pulverización de superficies lavables y sensibles de productos sanitarios como, por ejemplo:

- Camillas de pacientes
- Monitores, pantallas, teclados y paneles de control
- Dispositivos médicos no invasivos
- Áreas que requieren un efecto desinfectante rápido
- Para equipamiento médico en hospitales, residencias, ambulancias y centros de atención primaria, entre otros

Ventajas

- Solución desinfectante lista para su uso, actúa rápidamente
- Especialmente delicada con los materiales, como Makrolon[®], Plexiglas i Polisulfon
- Buen humedecimiento
- Presentación de 750 ml con práctica pistola pulverizadora incorporada para mayor comodidad (formato espuma)
- Libre de aldehídos, colorantes y fragancias

Instrucciones de uso

La solución Bacillo[®] 30 Foam se presenta lista para su uso. Humedecer suficientemente con una cantidad adecuada de solución las superficies a desinfectar y distribuir el producto mediante una toallita desechable. Para la desinfección de dispositivos electrónicos, dispositivos médicos y superficies verticales o desiguales, se recomienda pulverizar directamente la cantidad suficiente de Bacillo[®] 30 Foam en una toallita desechable y desinfectar los dispositivos con ésta. Mantener la superficie húmeda durante todo el tiempo de exposición indicado.

Technical Data Sheet

Bacillo[®] 30 Foam

La pistola pulverizadora especialmente diseñada para la presentación de 750 ml permite una aplicación más uniforme del producto (formato espuma) y además facilita el control visual de su aplicación.

Hay que asegurar que no quede solución desinfectante dentro de los productos. Para más detalles y en caso de requerirse, debe leerse el manual de instrucciones del producto sanitario a desinfectar.

Compatibilidad de uso

La solución Bacillo[®] 30 Foam es compatible con los siguientes materiales:

- **Metales:** acero inoxidable, aluminio, cobre, latón
- **Plásticos:** caucho, polisulfona, látex, PVC, poliacrilato (Plexiglás[®]), silicona, poliestireno, teflón (politetrafluoropropileno), policarbonato (Makrolon[®]), Viton[®] (copolímeros de fluoruro de vinilideno-hexafluoro propileno), caucho blando (caucho butadieno)

Cuando se usa según las instrucciones no se producen daños en el material. No es válido para la desinfección de productos sanitarios invasivos.

Eficacia del producto

Bacterias y Hongos			
Eficacia en	Espectro	Normativa	Tiempo de exposición
EN Fase 2 / Paso 1	Bactericida	EN 13727	30 segundos
	Levuricida	EN 13624	30 segundos
	Tuberculicida / Micobactericida	EN 14348	5 minutos
Virus			
EN 14476 Fase 2 / Paso 1	Virucida contra virus encapsulados (incl. VHB, VIH, VHC)	EN 14476	30 segundos
	Espectro virucida limitado	EN 14476	30 minutos
Eficacia contra virus no encapsulados	Adenovirus	EN 14476	30 minutos
	Norovirus murino (MNV)	EN 14476	5 minutos
	Rotavirus	EN 14476	1 minuto
DVV	Virucida contra virus encapsulados (incl. VHB, VIH, VHC)	DVV	30 segundos
	Poliomavirus	DVV	5 minutos

DVV: Sociedad Alemana para el Control de Enfermedades Víricas

Technical Data Sheet

Bacillol® 30 Foam**Composición del producto**Ingredientes activos de la solución:

Propan-1-ol	60 mg/g
Propan-2-ol	100 mg/g
Etanol	140 mg/g
N-alkil aminopropil glicina	5 mg/g

Propiedades específicas del producto:

Punto de inflamación:	31 ° C (DIN 51755)
Densidad a 20°C:	aprox. 0.96 g/cm ³

Látex: no contiene látex.

Presentación

Producto	Formato	Ref. HARTMANN
Bacillol 30 Foam	750 ml con pistola pulverizadora Solución en formato espuma	981664

Aspectos de seguridad

No utilizar para la desinfección de productos sanitarios invasivos.

Los desinfectantes deben utilizarse de forma segura. Leer siempre el etiquetado y la información de producto antes de su uso.

Etiquetado

Fecha de caducidad:

ej.:  2019 04
Año mes

Caducidad del producto antes de su apertura: 3 años.

Caducidad tras la apertura del producto: 12 meses.

Acondicionamiento

El producto se presenta en envases de 750 ml (con pistola pulverizadora), empaquetados en la caja de transporte.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.