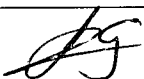
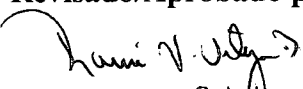
 Laboratorios Clarben S.A.	TÍTULO:	CÓDIGO: FT-SGC011.01
	LACLEDIN INSTRUMENTAL	REEMPLAZA: R2
	FECHA DE EMISIÓN: 29/DIC/2016	No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:  Firma/fecha 29/12/2016	Revisado/Aprobado por:  Firma/fecha 29/12/2016
---	--

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por Laboratorios Clarben, S.A.

1. CARACTERÍSTICAS

Desinfectante concentrado. Libres de aldehídos y fenoles. Bactericida/fungicida a los 60 minutos (2%), a los 30 minutos (4%). Activo frente a MRSA (estafilococo áureo Methicilin-resistente), a los 30 segundos (2%), VIH/HBV – activo a los 15 minutos (2%), Tuberculocidal a los 60 minutos (2%).

Con un amplio espectro de acción activo frente a Staphylococcus aureus resistente a la Meticilina, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis (TB), Clostridium difficile (CDiff) formas vegetativas de organismos Gram positive, Virus HIV-1, Virus Influenza Humana tipo B, Aspergillus niger, Candida albicans.

Contiene cloruro de benzalconio, cloruro de didecildimetilamonio, hidrocioruro de biguanida polimérica, tensoactivos anfóteros (menos del 5%), desinfectantes y perfume.

2. FINALIDAD

Desinfectante concentrado para instrumental, fresas e instrumentos de endodoncia y otros.

3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE

Producto sanitario Clase IIB.

4. PRESENTACIÓN

Lacledín Instrumental. Botella de 2 litros con tapón dosificador.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

➤ Ref: 07-015

6. MODO DE EMPLEO

- Solución al 2%: verter el producto en el tapón dosificador (20 ml) y diluir en 1 litro de agua limpia (2%).
- Solución al 4 % (duplicar la dosis de producto). Sumergir el material a desinfectar en esta solución y dejar actuar 5 minutos (virucida, bactericida), 15 minutos (fungicidas).
- No exceder estos tiempos.
- Puede ser utilizado de 2% o 4%.
- Puede ser usada para el baño ultrasónico.
- Cambiar la solución cada semana, o antes si es necesario.
- No usar en materiales de aleación, hierro maleable o partes.

7. ADVERTENCIAS

Precauciones conforme a la Directiva de Sustancias Peligrosas

- Provoca quemaduras.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evítese el contacto con los ojos
- En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico
- En caso de contacto con la piel, lávenlos inmediata y abundantemente con agua
- no tirar los residuos por el desagüe
- No usar después de la fecha de caducidad
- Para más información consultar la Hoja de seguridad.

8. IMAGEN

