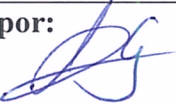
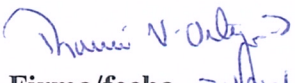
 Laboratorios Clarben S.A.	TÍTULO: LACLEDIN SUPERFICIES 600mL	CÓDIGO: FT-SGC012.01
	FECHA DE EMISIÓN: 29/DIC/2016	REEMPLAZA: R3
		No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:  Firma/fecha <i>29/12/2016</i>	Revisado/Aprobado por:  Firma/fecha <i>29 Dic 2016</i>
---	---

1. CARACTERISTICAS

Desinfectante para superficies activo frente a Staphylococcus aureus resistente a la Meticilina, Virus Influenza tipo AH1N1, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Mycobacterium tuberculosis (TB), Clostridium difficile (C-Diff) formas vegetativas de organismos Gram positivo, Virus HIV-1, Virus Influenza Humana tipo B, Staphylococcus aureus, Virus Hepatitis C, Aspergillus niger, Candida albicans.

Con agradable perfume. Contiene entre otros ingredientes; Etanol, Propan-2-ol, hidrocloreuro de biguanida polimérica, desinfectantes, perfume, Linalool, Limonene

2. FINALIDAD

Especialmente indicado para una desinfección de todas las superficies de producto sanitario no invasivos, sillas, mesa de instrumentos y el mobiliario general de la consulta dental.

3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE

Producto sanitario Clase IIA.

4. PRESENTACIÓN

Lacledin superficies spray 600 ml. Aroma limón

5. NÚMERO DE REFERENCIA

➤ Ref: 07-012

6. MODO DE EMPLEO

- Rocíe las superficies y objetos a desinfectar a una distancia de aprox. 30 cm hasta que estén completamente humedecidos.
- Esperar 30 segundos para que surta efecto.
- Dejar que se evapore el producto o secar con una toallita limpia.

7. ADVERTENCIAS

Precauciones conforme a la Directiva de Sustancias Peligrosas

- Fácilmente inflamable.
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Manténgase el recipiente bien cerrado
- Protéjase de fuentes de ignición - No fumar.
- No respirar los vapores
- Evítese el contacto con los ojos
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico.

Visado DT:



**LACLEDIN SUPERFICIES
600ML**

CÓDIGO:
FT-SGC12.01

No. PÁG.: **3 de 3**

- No tirar los residuos por el desagüe.
- No usar después de la fecha de caducidad.
- No utilice sobre superficies sensibles al alcohol.
- No usar conjuntamente con productos clorados ya que se puede producir una coloración de la superficie a desinfectar.
- Para más información consultar la Hoja de seguridad.

8. IMAGEN



Visado DT: 

