



Mantenimiento

de MC2 y MC3

Micromotores de carbono

Consulte el manual del usuario del producto para el procedimiento de limpieza y esterilización. Este aparato médico se suministra en condición "no estéril". Por favor asegúrese de seguir dicho procedimiento antes de la utilización del aparato.

1 Preparación



A. Desconecte el motor del cable

B. Extraiga la carcasa

2 Limpieza



A. Limpieza exterior

• Limpieza exterior con Spraynet

3 Desinfección




A. Utilizando desinfectante



(siga las instrucciones de uso del fabricante)

No sumerja el instrumento en baño desinfectante

4 Esterilización

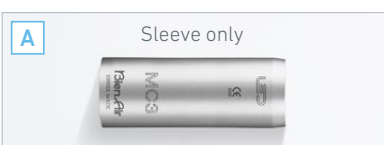

A. Introduzca la carcasa del motor en una bolsa de esterilización

B. Esterilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante



• Los instrumentos que muestren este símbolo pueden ser esterilizados en un autoclave